



Vicenza 36100 - Via G. Lanza, 80  
Tel. 0444-571880 Fax 0444-571871

Verona 37135 - Via Gorizia, 1/c  
Tel. 045-8203626 Fax 045-9231355

## Istruzioni generali per l'uso dei dispositivi di nostra produzione

### Descrizione del dispositivo

Questo dispositivo è stato costruito correttamente secondo le normative vigenti e dietro prescrizione medica. La qualità dei materiali e delle macchine è garantita dalla loro rispondenza alle caratteristiche che le specifiche europee prevedono e per questo il dispositivo fornito è da ritenersi sicuro. Il successo del dispositivo dipende anche dalla corretta installazione verificando che i contatti e tutte le parti siano alloggiare perfettamente.

Controllare che a dispositivo inserito non vi siano punti di compressione o sporgenze e che la stabilità del dispositivo sia conforme alla masticazione.

Inserire il dispositivo con due mani ed accertarsi che sia ben posizionato, se si accusano dolori o pressioni eccessive rimuovere e migliorare la posizione di inserimento.

### Norme di utilizzo

Il dispositivo deve essere pulito correttamente con acqua fredda e con i detergenti previsti al caso, la rimozione dei residui alimentari è fondamentale per consentire al dispositivo di mantenere le funzioni per cui è stato creato.

Evitare di far assestare il dispositivo con i denti, potrebbe causare alterazioni alla struttura dello stesso.

Non avvicinare a fonti di calore

Conservare sempre sul contenitore allegato.

Non esercitare pressioni al di fuori del cavo orale.

Non conservarlo su tovaglioli salviettine o altro

Non adottare per la pulizia solventi o soluzioni alcoliche, acide che non siano state preventivamente autorizzate dal costruttore.

Conservare il dispositivo dentro la custodia con il quale vi è stato fornito, per evitare possibili danni durante le pause di utilizzo.

Se viene utilizzato in combinazione al altri dispositivi verificare la compatibilità degli stessi e dei materiali di costruzione.

Per qualsiasi dubbio o problema non esiti di contattare il medico specialista che ha installato il dispositivo.